

Denseo OxyBond Gebrauchsanleitung




Anstrahlen

Das ausgearbeitete und zum Verblenden vorbereitete Gerüst mit 250 µm Aluminiumoxid bei 3 – 4 bar anstrahlen, um eine notwendige Verzahnung an der Oberfläche zu gewährleisten.



OxyBond auftragen


Tragen Sie den OxyBond gleichmäßig sehr dünn auf. Ein Zusammenlaufen des Materials an Kronenrändern oder interdental bei Brücken ist zu vermeiden.

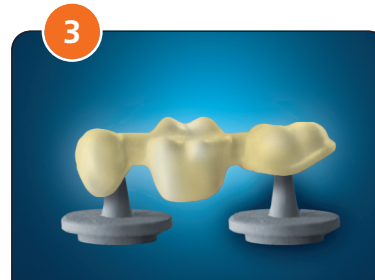

Brandführung

Je nach Ofen können die angegebenen Werte abweichen. Durch die Streukristalle hat der OxyBond nach dem Brennen die perfekte Oberfläche für die nötige Verzahnung.

**Bitte beachten
Sie die Denseo
OxyBond Brenntabelle**

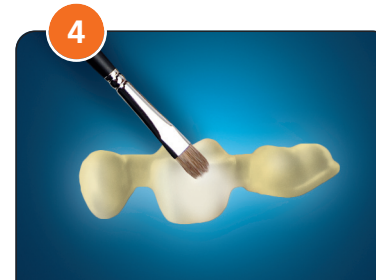

Opaker

Tragen Sie nun wie gewohnt Ihren Opaker deckend auf.



Verblenden

Nun können Sie wie gewohnt das Gerüst mit Ihrer Verblendkeramik verblenden und nach Herstellerangaben brennen.

Brenntabelle:

Start:	600°C
Vortrocknen:	2 Min.
Aufheizrate:	80°C/Min.
Endtemperatur:	980°C
Haltezeit:	30 Sekunden
Vakuum an:	600°C
Vakuum aus:	980°C

Wichtig

Die angegebenen Brenntemperaturen sind Richtwerte. Abweichungen auf Grund unterschiedlicher Ofenleistungen sind möglich und müssen gegebenenfalls angepasst werden.